

BENUTZERHANDBUCH

Aluminium 4-Rad-Rollator

Produktcode: TGR-R RA 882



1. Eigenschaften

Der zusammenklappbare 4-Rad-Rollator besteht aus einem Aluminiumrahmen, der mit einer metallisch glänzenden Farbe beschichtet ist. Er verfügt über einen breiten gepolsterten Sitz, eine weiche Rückenlehne, einen abnehmbaren Korb und höhenverstellbare Griffe mit anatomischen Handgriffen und Feststellbremsen. Das Produkt ist mit Rädern mit schmalen Querschnitt und einem Durchmesser von 8 Zoll ausgestattet.

Das Set beinhaltet: zwei Griffe mit Bremsen, Rahmen mit Sitz, Rückenlehne, Korb, Befestigungsknöpfe – 2 Stk.

Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Feststellbremse
- C. Feststellknopf
- D. Bremszüge
- E. Rückenlehne
- F. Sicherungstift
- G. Seitliche Querstrebe
- H. Scharnier von
Seitliche Querstrebe
- I. Gurt für
Faltbarer Rollator
- J. Korb
- K. Obere Einstellung der Bremse
- L. Untere Einstellung der Bremse
- M. Stockhalter



2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts, zur Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit

Bewegungsproblemen und Aufstehproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

3. Montage

Aufklappen und Zusammenklappen des Rollators

- Um den Rollator aufzuklappen, drücken Sie auf die seitliche Querstrebe, die sich unter dem Sitz befindet, bis die Scharniere vollständig aufgeklappt sind. Befestigen Sie dann die Griffe in den Montageöffnungen und wählen Sie die entsprechende Höhe durch Festziehen der Feststellknöpfe aus. Die Bremskabel sollten vorne angebracht sein. Lehnen Sie den Sitz gegen den aufgeklappten Rahmen.
- Fixieren Sie die Rückenlehne in den Befestigungsöffnungen an der Vorderseite des Rollators, bis die Bolzen einrasten.
- Der Korb kann am Rahmen aufgehängt oder unter dem Sitz befestigt werden.
- Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung von den Rädern.
- Um den Rollator für den Transport zusammenzuklappen, senken Sie den Sitz ab und ziehen Sie den Riemen, der die seitliche Querstrebe mit dem Rahmen verbindet, nach oben, bis der Rahmen vollständig zusammengeklappt ist.

HINWEIS! Seien Sie beim Zusammenklappen oder Auseinanderbauen des Rollators vorsichtig, da die Gefahr besteht, dass Sie sich die Finger in den Scharnieren einklemmen.

Bremsenfunktion

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben und halten Sie ihn gedrückt.
- Wenn Sie anhalten oder den Sitz benutzen, blockieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsgriff nach unten drücken.
- Zum Lösen der Bremse ziehen Sie den Bremsgriff nach oben.

Höhenverstellung der Griffe

- Um die Höhe der Griffe einzustellen, schrauben Sie die Feststellknöpfe an der Außenseite des Rahmens ab, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und ziehen Sie die Feststellknöpfe fest.

Hinweis! Die Griffe müssen auf gleicher Höhe angebracht sein.

Einstellung der Bremsen

Einstellung der oberen Bremse

Die Mutter des Kabels abschrauben, auf die entsprechende Länge aufziehen und durch Anziehen der Feststellschraube fixieren.

Einstellung der unteren Bremse

Lösen Sie die Befestigungsschraube mit einem Gabelschlüssel , ziehen Sie am schwarzen Bremskabel, um die Kabelspannung einzustellen, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	60 cm
Gesamttiefe	66 cm
Sitzmaße	35 cm x 32 cm
Sitzhöhe vom Boden	53 cm
Griffe zur Höhenverstellung	77-88 cm
Gewicht	8,2 kg
Maximale Kapazität	110 kg
Maximale Kapazität des Korbes	5 kg
Rahmenfarben	rot, blau, titan

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Poliermittel, da diese die Schutzbeschichtung beschädigen können. Reinigen Sie bewegliche Teile des Rollators (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser) regelmäßig von Schmutz.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2024 (III)