


## 1. Eigenschaften

Der 3-Funktions-Klappgehwagen besteht aus einem querverstärkten Aluminiumrahmen. Der Gehwagen ist mit Vorderbeinen mit Gummikappen und mit Beinen mit soliden Rädern mit 5 Zoll Durchmesser ausgestattet. Er erfüllt 2 Funktionen: die starre und die hin- und hergehende. Dank letzterer ist es möglich, die Seiten abwechselnd zu bewegen, ohne den Gehwagen anheben zu müssen. Der Gehwagen verfügt über Verriegelungsclips, mit denen die Funktionen gewechselt werden können, einen breiten Stützbereich sowie eine stabile und lange Gehstrecke. Weiche und geschäumte Handgriffe sorgen für die richtige Stabilisierung und bequeme Nutzung. Dank verstellbarer Beine kann die Höhe des Gehwagens an die Körpergröße des Benutzers angepasst werden. Der zusammengeklappte Gehwagen nimmt wenig Platz ein und kann daher leicht gelagert und transportiert werden.

### Elemente des Gehwagens:

- A. Handgriff
- B. Rahmenklappclip
- C. Funktionsänderung
- D. Höhenverstellung
- E. Rutschfeste Gummispitze
- F. Räder 5" im Durchmesser

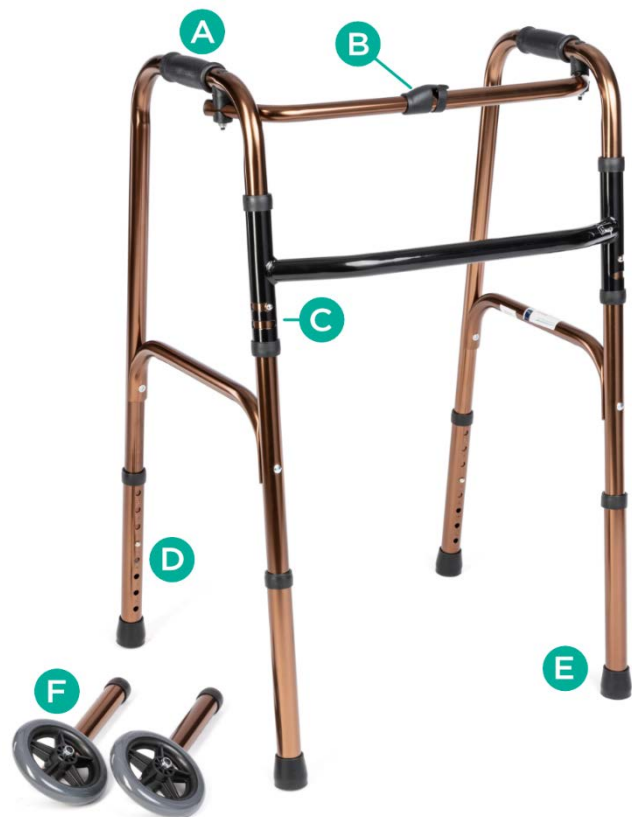

## 2. Anwendung

Der Gehwagen mit 3 Funktionen ist ein Zusatzgerät für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe

benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Balancehaltung, Verbesserung des Gehkomforts und zur Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Gehwagens wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Personen mit Erkrankungen der unteren Gliedmaßen und mit Bewegungsproblemen oder Aufstehproblemen aus.

### **3. Montage**

#### **Aufklappen und Zusammenklappen**

- Vor dem Zusammenklappen des Gehwagens Beine mit Spitzen oder mit Rädern montieren.
- Um den Rollator aufzuklappen, ziehen Sie die Seiten ganz auseinander, bis die Handgriffe einrasten.
- Zum Zusammenklappen des Rollators drücken Sie auf das in der Mitte des Querrahmens befindliche Kunststoffelement und klappen die Seitenteile um.

#### **Höhenverstellung**

- Die Höhe sollte so eingestellt sein, dass der Benutzer, der sich an den Handgriffen abstützt, mit den Schultern in Ruheposition und leicht gebeugten Ellbogen so aufrecht wie möglich steht. Es ist nicht ratsam, sich mit dem gesamten Körpergewicht am Gehwagen festzuhalten.
- Um die Höhe der Beine einzustellen, drücken Sie den Metallstift, wählen Sie die entsprechende Beinhöhe aus und verriegeln Sie die Position der Beine relativ zueinander. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten einstellbar .

**Hinweis!** Die Stifte müssen in jedem Bein auf der gleichen Höhe angebracht sein.

#### **Auswahl der Funktionen**

- Starre Funktion – Entfernen Sie die Verriegelungsclips vom oberen horizontalen Element, das den Rahmen verstärkt, und platzieren Sie sie in den Öffnungen, die sich auf der gleichen Höhe, aber am vertikalen Element des Rahmens befinden.
- Pendelfunktion – Die Verriegelungsclips werden erneut in die Befestigungsöffnungen am Horizontalelement eingesetzt.
- Abhängig von der gewählten Funktion können Beine mit Spitzen oder mit Rollen montiert werden.

## 4. Technische Daten

Gesamtbreite mit Spitzen	55 cm
Gesamtbreite mit Rädern	60 cm
Innenweite	46 cm
Gesamttiefe mit Spitzen	46 cm
Gesamt Tiefe mit Rädern	50 cm
Höhe Einstellung	72-91 cm
Gewicht	2,9 kg
Maximale Kapazität	136 kg

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Gehwagens, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Wartung

- Reinigen Sie den Rahmen des Gehwagens mit einem feuchten Tuch (nur Wasser und milde Reinigungsmittel). Nach jedem Gebrauch trockenwischen.
- **Verwenden Sie** zur Reinigung keine starken Polier- und Schleifmittel, scharfe Reinigungsmittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).
- Entfernen Sie eventuell vorhandene Verschmutzungen an den beweglichen Teilen des Gehwagens (Scharniere, Klemmschrauben, Verriegelungen).

## 7. Lager und Transportbedingungen










Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf

unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



### Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (II)