

# BENUTZERHANDBUCH

## Aluminium 4-Rad Rollator mit Kniestütze

Produktcode: Knee Walker



### 1. Eigenschaften

Der 4-Rad-Rollator mit Kniestütze besteht aus einem Aluminiumrahmen, der mit metallisch glänzender Farbe beschichtet ist. Der Rollator ist mit einer abnehmbaren Tasche, einer Fußstütze und einer höhenverstellbaren Kniestütze ausgestattet. Das Produkt verfügt außerdem über einen höhenverstellbaren Lenker mit anatomischen Handgriffen und Handbremsen (Hinterräder) sowie Räder mit schmalem Querschnitt und 8 Zoll Durchmesser.

### Das Set beinhaltet:

faltbarer Rahmen, Kniestütze, universelle Fußstütze, Fußstützenkappe, Tasche mit Reflektorstreifen, kurze Befestigungsknöpfe – 3 Stk., langer Befestigungsknopf – 1 Stk.

### Elemente des Rollators:

- A. Handbremsen
- B. Lenker
- C. Kniestütze
- D. Befestigungsknöpfe
- E. Bremszug
- F. Längenverstellung
- G. Fußstütze
- H. Fußstützenkappe
- I. Sicherheitsschnalle
- J. Tasche



### 2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die eine stabile Unterstützung benötigen. Er wird auch älteren

Menschen und Menschen mit Verletzungen der unteren Gliedmaßen empfohlen, da er ihnen hilft, das Gleichgewicht zu halten, den Bewegungskomfort zu verbessern und die Sturzsicherheit zu gewährleisten. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen nach Verletzungen aus. Er gewährleistet eine bessere Stabilisierung, Unterstützung und Sicherheit beim Bewegen.

**HINWEIS!** Der Rollator sollte nicht von Personen mit Problemen oder Verletzungen des Kniegelenks verwendet werden, da bei der Verwendung des Rollators auf diesen Bereich ein hoher Druck ausgeübt wird.

### 3. Montage

#### Aufklappen und Zusammenklappen des Rollators



Bild 1



Bild 2

- Klappen Sie den Rollator auf und befestigen Sie Teil A in Teil B, bis Sie ein Klicken eines Verriegelungsstifts hören. Sichern Sie den Rahmen mit den Feststellknöpfen.

**HINWEIS!** Die Länge zwischen Teil A und B ist einstellbar. Um sie einzustellen, schrauben Sie den Feststellknopf ab, nehmen Sie ihn heraus und drücken Sie dann die Stifte auf beiden Seiten, um den Rahmen auf die entsprechende Länge einzustellen. Sichern Sie ihn anschließend mit dem Feststellknopf.

- Sichern Sie die Hinterräder, indem Sie den langen Feststellknopf in die Öffnung an der Rückseite von Teil B stecken. Ein richtig

montierter Feststellknopf sollte durch 4 Öffnungen von Teil B passen (Abb. 2). Ziehen Sie den Feststellknopf fest.

- Schieben Sie die Stange nach vorne, um Lenker und Rollatorbasis zu verbinden (horizontale Position). Ziehen Sie die Sicherheitsschnalle fest (siehe Bilder 3-5).



*Bild 3*



*Bild 4*



*Bild 5*

- Sichern Sie den Lenker, indem Sie ihn auf die entsprechende Länge hochziehen. Führen Sie die Feststellschraube durch die Öffnung an der Vorderseite und ziehen Sie sie mit einem Drehknopf auf der anderen Seite fest.
- Befestigen Sie die Kniestütze in der Öffnung in Teil B. Wählen Sie die entsprechende Höhe und sichern Sie sie mit dem Feststellknopf.
- Sichern Sie die Fußstütze mit der mitgelieferten Kappe.



*Bild 6*

- Schieben Sie die Tasche in die oberen Öffnungen einer speziellen Platte an der Vorderseite der Stange. Drücken Sie die Tasche nach unten, um sie zu fixieren (Abb. 6). Für zusätzliche Sicherheit befestigen Sie den Klettverschluss an der Rückseite.

**HINWEIS!** Am Boden der Tasche befindet sich ein zusätzlicher Einsatz aus steifem Material. Mit Klettbandern lässt er sich fixieren.

- Um den Rollator zusammenzuklappen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass Sie alle Feststellknöpfe mit Schrauben entfernen, Teil A von Teil B trennen, die Kniestütze abnehmen und den Lenker in die horizontale Position klappen.

**Hinweis!** Achten Sie beim Zusammenklappen des Lenkers darauf, die Sicherheitsschnalle zu entriegeln und ihn zur Seite zu ziehen, um die Lenkerbasis vom Rahmen zu trennen.

### **Bremsen**

- Um den Rollator anzuhalten, drücken Sie gleichzeitig beide Bremsgriffe.

### **Höhenverstellung der Griffe**

- Um die Höhe der Griffe einzustellen, schrauben Sie die Feststellknöpfe an der Außenseite des Rahmens ab, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und ziehen Sie die Feststellknöpfe fest.

## **4. Technische Daten**

Gesamtbreite	44 cm
Maße der Kniestütze	35 x 18 cm
Gesamtlänge	84-89 cm
Sitzhöhe vom Boden	45,5-58 cm
Griffe zur Höhenverstellung	89-119 cm
Gewicht	9,6 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Rahmenfarbe	Schwarz

## 5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

## 6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Poliermittel, da diese die Schutzbeschichtung beschädigen können. Reinigen Sie bewegliche Teile des Rollators (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser) regelmäßig von Schmutz.



## 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung



Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!





## **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (II)