

# BENUTZERHANDBUCH

## Gehtisch mit Unterarmstütze

Produktcode: TGR-R RS 8812



### 1. Eigenschaften

Der Gehtisch mit Unterarmstütze besteht aus einem verchromten Stahlrahmen. Er ist mit geschäumten Handgriffen, einem Infusionsständerhalter, einer gepolsterten Unterarmstütze mit stufenloser Höhenverstellung, einem gepolsterten Unterarmstütze mit stufenloser Höhenverstellung, einem abnehmbaren Sitz und Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

**Im Set enthalten sind:** Gestell mit Rollen, oberer Stabilisierungsrahmen, unterer Stabilisierungsrahmen, Unterarmstütze, Sitz, Verriegelungsclips – 4 Stück, Flügelschrauben – 2 Stück.

#### Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Unterarmstütze
- C. Verriegelungsclip
- D. oberer Stabilisierungsrahmen
- E. unterer Stabilisierungsrahmen
- F. Flügelschraube
- G. Sitz
- H. Infusionsständerhalter
- I. sperren



### 2. Anwendung

Der Gehtisch ist ein Zusatzgerät und ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität bestimmt, die beim Aufrichten und Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er ist insbesondere für Patienten bestimmt, die an verschiedenen Arten von Bewegungsstörungen sowie eingeschränkter Mobilität, Funktionsstörungen oder Schwächung der unteren Gliedmaßen leiden. Der Gehtisch wird auch älteren Menschen als Hilfe zum Halten des Gleichgewichts, zur Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Gehtisches wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Bewegungs- und

Aufrichtproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

### 3. Montage

#### Entfaltung

- Den Geh Tisch so auf den Boden stellen, dass der untere Stabilisierungsrahmen außen liegt. Den oberen Stabilisierungsrahmen in die Befestigungsöffnungen im vorderen Teil des Rahmens stecken und mit Flügelschrauben festschrauben.
- Fixieren Sie die Unterarmstütze in den Befestigungsöffnungen des Rahmens und mit den Verriegelungsklammern auf der entsprechenden Höhe arretieren.
- Befestigen Sie den Sitz am unteren Teil des Rahmens. Verwenden Sie den Sitz zum vorübergehenden Ausruhen. Beim Bewegen mit einem Geh Tisch sollte der Sitz am äußeren Teil des Rahmens aufgehängt werden.
- Wenn Sie einen Infusionsständer verwenden, platzieren Sie ihn im Infusionsständerhalter im vorderen Teil des Rahmens.

#### Schlösser

**Hinweis!** Während der Verwendung des Sitzes sollten alle Sperren aktiviert sein.

#### Höhenverstellung der Unterarmstütze

Die Höhe der Unterarmstütze sollte so eingestellt werden, dass der Benutzer mit den Schultern in Ruheposition und den Ellbogen auf der Stütze aufrecht stehen kann. Es ist nicht ratsam, mit dem gesamten Körpergewicht am Geh Tisch zu hängen.

- Um die Höhe der Unterarmstützen zu verstellen, ziehen Sie den Feststellclip, der sich an der Außenseite des Rahmens befindet, heraus, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und montieren Sie den Feststellclip wieder.

### 4. Technische Daten

Gesamtbreite	63 cm
Gesamttiefe	76 cm

Sitzmaße	56 cm x 20 cm
Sitzhöhe vom Boden	54 cm
Höhenverstellung der Unterarmstütze	101-124 cm
Gewicht	10,8 kg
Maximale Kapazität	100 kg

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Verwenden Sie keine starken Poliermittel, da dies die Schutzbeschichtung beschädigen kann.
- Befreien Sie bewegliche Teile des Rollators regelmäßig von Schmutz (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser).

## 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
---	----------------	---	------------

	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



### **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (III)