

# BENUTZERHANDBUCH

## 3-Rad-Rollator aus Stahl

Produktcode: TGR-R RT 892G



### 1. Eigenschaften

Der 3-Rad-Rollator besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Der Rollator ist mit Feststellbremsen, einem Korb mit abnehmbarem Tablett und einer Einkaufstasche mit Reißverschluss ausgestattet. Er hat solide Räder mit 8 Zoll Durchmesser und höhenverstellbare ergonomische Griffe.

**Das Set beinhaltet:** Stahlrahmen, zwei anatomische Handgriffe, Korb, Tablett, Einkaufstasche, Feststellknöpfe – 2 Stk.

#### Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Feststellbremse
- C. Feststellknopf
- D. Korb
- E. Einkaufstasche
- F. Bremszug
- G. Scharnier
- H. Obere Einstellung der Bremse
- I. Untere Einstellung der Bremse



### 2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts, zur Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der

Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Bewegungsproblemen und Aufstehproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

### **3. Montage**

#### **Aufklappen und Zusammenklappen des Rollators**

- Zum Aufklappen des Rollators ziehen Sie den Rahmen an den Hinterrädern auseinander.
- Drücken Sie auf das in der Rahmenmitte befindliche Scharnier, bis der Rollator vollständig aufgeklappt ist.
- Schiebegriffe in den Montageöffnungen fixieren und mit Feststellknöpfen arretieren.
- Um den Rollator zusammenzuklappen, ziehen Sie am Scharnier der Querstrebe, das sich in der Mitte der Metallquerstrebe befindet, und klappen Sie den Rollator mithilfe der Griffe oder des Rahmens zusammen.
- Korb mit Tablett an kleinen Haken im vorderen Teil des Gestells aufhängen.
- Die Einkaufstasche kann durch Öffnen der Clips an beiden Seiten des Rahmens entfernt werden.

#### **Bremsenfunktion**

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben und halten Sie ihn gedrückt.
- Wenn Sie anhalten oder den Sitz benutzen, blockieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsgriff nach unten drücken.
- Zum Lösen der Bremse ziehen Sie den Bremsgriff nach oben.

#### **Höhenverstellung der Griffe**

- Um die Höhe der Griffe einzustellen, schrauben Sie die Feststellknöpfe unterhalb der Schiebegriffe ab, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und ziehen Sie die Feststellknöpfe fest.

## Einstellung der Bremsen

### Einstellung der oberen Bremse

- Mutter des Seils abschrauben, auf die entsprechende Länge aufziehen und durch Anziehen der Kontermutter fixieren.

### Einstellung der unteren Bremse

- Lösen Sie die Befestigungsschraube mit einem Gabelschlüssel, ziehen Sie am schwarzen Bremskabel, um die Kabelspannung einzustellen, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

## 4. Technische Daten

Gesamtbreite	62 cm
Gesamttiefe	56 cm
Griffe zur Höhenverstellung	82-97 cm
Gewicht	7,7 kg
Maximale Kapazität	110 kg
Maximales Fassungsvermögen der Einkaufstasche und des Einkaufskorbs	5 kg
Rahmenfarbe	Blau

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Gehwagens, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Reinigung und Wartung

### Bewertungen

Führen Sie eine systematische Sichtprüfung aller Verbindungselemente (Klemmen, Scharniere) des Gehwagens durch, einschließlich:

- Höhenverstellung der Griffe
- Arbeit der Klemme, die die Höhe der Griffe blockiert

- Stabilität und Optik des Rahmens

## Reinigung

Kontrollieren Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gehwagens:

- Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Verwenden Sie keine starken Poliermittel, da dies die Schutzbeschichtung beschädigen kann.
- Befreien Sie bewegliche Teile des Gehwagens (Scharniere, Klemmschrauben, Verriegelungen) regelmäßig von Schmutz.







## 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!







## **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (III)