

1. Eigenschaften

Der Transportduschstuhl besteht aus einem Aluminiumrahmen. Er besteht aus einer Rückenlehne und einem U-förmigen Sitz aus strapazierfähigem PVC, hochklappbaren Armlehnen, einer klappbaren Beinstütze, stabilen Hinterrädern (6 Zoll) und schwenkbaren Vorderrädern (4 Zoll) mit Feststellern.

Elemente des Stuhls:

- A. Rückenlehne
- B. Armlehne
- C. Sitz
- D. Sicherungsstift
- E. Montageschraube
- F. Fußstütze
- G. Sperren



2. Anwendung

Der Transportduschstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung von Hygienetätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Funktionsstörungen und motorischen Störungen empfohlen. Der Stuhl sollte nur mit Hilfe einer Begleitperson verwendet werden. Der Stuhl ist für den Einsatz innerhalb von Gebäuden zu Hause und in Krankenhäusern vorgesehen.

3. Montage

Schritt 1. Klappen Sie die Beinstütze aus.

Schritt 2. Heben Sie den Sitz an und fixieren Sie ihn am hinteren Teil des Rahmens, indem Sie die Montageschraube festziehen.

Schritt 3. Stecken Sie die Rohre der Rückenlehne in den hinteren Teil des Rahmens und verriegeln Sie die Rückenlehne mit den Verriegelungsstiften.

Schritt 4. Senken Sie die Armlehnen ab.

Der Stuhl ist gebrauchsfertig.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	54 cm
Gesamttiefe	74 cm
Sitzhöhe vom Boden	47 cm
Gesamthöhe	88 cm
Sitzmaße	40 x 37,5 cm
Gewicht	6 kg
Maximale Kapazität	100

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für das unsachgemäße Bewegen des Transportduschstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Stuhlkomponenten durch:

- Der Stuhl kann mit einem feuchten Tuch und kaltem oder warmem Wasser gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Von Wärmequellen fernhalten










7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.timago.com.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2024 (IV)