

BENUTZERHANDBUCH

Badewannenhaltegriffe 30 cm / 40 cm / 45 cm / 60 cm / 80 cm

Produktcode: JMC-C 54012/16/18/24/32



1. Eigenschaften

Haltegriffe für die Badewanne bestehen aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Durch die Anwendung mehrerer Schutzschichten sind sie feuchtigkeitsbeständig. Die Haltegriffe können vertikal oder horizontal montiert werden.

Das Set beinhaltet: Griff, Schrauben – 6 Stück, Dübel – 6 Stück, Gummischeiben.

2. Anwendung

Haltegriff für Badewanne ist ein Hilfsmittel, das das Aufrichten und Halten des Gleichgewichts erleichtert. Die Haltegriffe werden für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die die selbstständige Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens verhindern oder behindern. Die Haltegriffe für die Badewanne können in der Dusche, in der Badewanne, in Badezimmern und anderen feuchten Räumen zu Hause und in Krankenhäusern verwendet werden.

3. Montage und allgemeine Nutzungsempfehlungen

Hinweis! Befolgen Sie beim Zusammenbau die Anweisungen in dieser Anleitung. Benutzer mit eingeschränkter Mobilität benötigen möglicherweise die Hilfe einer dritten Person mit den entsprechenden Fähigkeiten.

Hinweis! Benutzen Sie die Haltegriffe nicht, wenn Sie sichtbare oder spürbare Schäden (z. B. Risse) feststellen, da dies zu Unfällen führen kann.

Schritt 1. Bestimmen und markieren Sie die Stelle an der Wand, an der die Stangen befestigt werden sollen.

Schritt 2. Mit einem Bohrer Montagelöcher in der entsprechenden Höhe und Breite in die Wand bohren.

Schritt 3. Befestigen Sie die Stangen mithilfe von Schrauben und Dübeln.

4. Technische Daten

Produktnummer	Breite	Gewicht
JMC-C 54012	30 cm	0,45 kg
JMC-C 54016	40 cm	0,53 kg
JMC-C 54018	45 cm	0,60 kg

JMC-C 54024	60 cm	0,69 kg
JMC-C 54032	80 cm	0,80 kg
Maximale Tragkraft: 100 kg		

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch der Badewannenhaltegriffe, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

- Reinigen Sie den Haltegriff regelmäßig mit Wasser, einem Schwamm und milden Reinigern für Kunststoffe wie Seife oder Feinwaschmittel und wischen Sie ihn nach jedem Gebrauch trocken.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel.
- Systematisch prüfen: Festziehen der Schrauben, Zustand des Haltegriffs (auf Risse)

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum

	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.
 Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.
 Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

C € MD
12/2024 (IV)