

BENUTZERHANDBUCH

Stahlrollstuhl

Produktcode: H011



1. Eigenschaften

Der Rollstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Er hat einen strapazierfähigen, schwarzen Sitz und ein Kissen aus Nylon-Baumwolle. Der Rollstuhl ist mit hochklappbaren und abnehmbaren Armlehnen ausgestattet. Fußstützen sind entweder in der Standardversion (wegschwenkbar) oder in der Version mit hochklappbarer Beinstütze erhältlich. Die hinteren Schnellspannräder (24") bestehen aus Stahlspeichen und sind mit Luft- oder Vollgummireifen ausgestattet. Die Vorderräder (8") bestehen aus hochfestem, abriebfestem Gummi.

Zusatzoptionen: hochklappbare Beinstütze, Bremsen für Begleitpersonen, Tisch.

Das Set beinhaltet: Gestell mit Sitz, Fußstützen mit Fußplatten, Montageschlüssel, Schutzgurt.

Elemente des Rollstuhls:

- A. Handgriff
- B. Armlehne
- C. Verriegelungstift für Armlehne
- D. Feststellbremse
- E. Greifreifen
- F. Schnellverschluss
- G. Fußstütze
- H. Montagestift für Fußstütze



2. Anwendung

Der Rollstuhl ist für Menschen konzipiert, die Probleme mit der Fortbewegung ohne fremde Hilfe haben, sowie für Patienten mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität. Dieser selbstangetriebene Rollstuhl kann auch von einer Begleitperson geschoben werden. Der Rollstuhl ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

3. Montage

Ausklappen und Zusammenbau

Schritt 1. Den Rollstuhl aufklappen

Stellen Sie den Rollstuhl auf den Boden. Klappen Sie den Rollstuhl mithilfe der Handgriffe an der Rückseite der Rückenlehne auseinander. Drücken Sie dann die Vorder- und Hinterkante des Sitzes zusammen, sodass alle Elemente zusammenpassen.

Schritt 2. Montage der Fußstützen

Montieren Sie die rechte und die linke Fußstütze im vorderen Teil des Rahmens, indem Sie sie auf zwei Stifte setzen und nach innen drehen, bis sie einrasten.

Schritt 3. Einstellung der Fußplatten

Stellen Sie die rechte und die linke Fußplatte mithilfe der Stifte und Verriegelungsclips ein, die an der Fußstütze angebracht sind. Stellen Sie bei hochstellbaren Beinstützen den Neigungswinkel zum Boden mithilfe des Hebels ein. Zwischen den Fußplatten und dem Boden sollte ausreichend Platz gelassen werden, da zu niedrig eingestellte Fußplatten das Überwinden von Hindernissen wie Bordsteinen erschweren können. Stellen Sie die Fußplatten so ein, dass der Winkel zwischen Rumpf und Oberschenkeln 90° beträgt (so hat der Benutzer eine optimale Sitzposition).

Schritt 4. Montage des Schutzbandes

Legen Sie den Schutzgurt an die Fußstützen, da er verhindert, dass die Beine des Benutzers von den Fußplatten unter den Rollstuhl rutschen.

Schritt 5. Überprüfung der Radmontage

Heben Sie den Rollstuhl leicht an und drehen Sie erst das rechte und dann das linke Rad, indem Sie an den Greifreifen ziehen und prüfen Sie, ob sich die Räder richtig drehen.

Hinweis! Verwenden Sie den Rollstuhl nicht ohne Schutzgurt. Nach Abschluss der oben genannten Tätigkeiten ist der Rollstuhl einsatzbereit.

FALTBAR

Für einen einfacheren Transport und eine einfachere Lagerung lässt sich der Rollstuhl wieder zusammenfalten.

- Bevor Sie den Rahmen zusammenklappen, schwenken Sie die Fußplatten weg und bringen Sie sie in eine vertikale Position (senkrecht zum Boden).
- Zum Zusammenklappen des Gestells ziehen Sie die Sitzfläche durch Festhalten an der Vorder- und Hinterkante jeweils in der Mitte nach oben, so dass das Gestell aus den Verbindungselementen springt.

KLAPPFUNKTION DER ARMLEHNEN

- Drücken Sie den Verriegelungsknopf im vorderen Teil der Armlehne und drücken Sie die Armlehne nach hinten.
- Um die Armlehne zu schließen, drücken Sie diese nach unten, sodass der Verriegelungsknopf einrastet.

Aufpumpen der Räder

- Wenn der Rollstuhl mit pneumatischen Hinterrädern mit 24 Zoll Durchmesser und Schwenkrädern und PU-Vorderrädern mit 8 Zoll Durchmesser (Schlauchlosreifen) ausgestattet ist, denken Sie daran, den Luftdruck in beiden Rädern zu kontrollieren und den Zustand der Reifen auf Abschürfungen, Schnitte oder Oberflächenverschleiß zu überprüfen.
- Um den Luftdruck in den Rädern auszugleichen, drehen Sie die Kappe vom Ventil ab, stecken Sie die Pumpe (im Set enthalten) in das Ventil und pumpen Sie die Luft.

PARKBREMSEN

- Um die Räder zu blockieren, drücken Sie den Bremshebel nach vorne, bis das Rad vollständig blockiert ist (getrennt für linkes und rechtes Rad). Bitte beachten Sie, dass die Feststellbremse nur dazu dient, die Räder zu blockieren, wenn der Rollstuhl vollständig zum Stillstand gekommen ist.

EINSTELLUNG DER PARKBREMS

Die richtige Verriegelung der Radbremse hängt von ihrer Einstellung und Position ab. Der Griff der Radbremse sollte so positioniert sein, dass der Bremsschuh das Rad fest blockiert und der Hebel keinen übermäßigen Widerstand erfährt.

- Bei zu großem Widerstand ziehen Sie den Griff durch Abdrehen der Feststellschraube, die sich auf der anderen Seite der Feststellbremse (von der Rollstuhlinnenseite aus) befindet, leicht nach vorne. Stellen Sie den Feststellschuh so ein, dass die Feststellbremse das Rad leicht und ohne Widerstand blockiert.
- Wenn der Bremsschuh das Rad nicht ausreichend berührt oder blockiert, befolgen Sie die obigen Anweisungen, indem Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

SICHERHEITSGURTE

Der Gurt, der zur Standardausstattung gehört, schützt den Rumpf, wenn der Benutzer aus dem Rollstuhl rutscht oder nicht in der Lage ist, die richtige Position selbständig beizubehalten. Der Gurt wird mithilfe einer Schnalle befestigt.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	59-70 cm
Innenweite	40, 43, 46, 48, 51 cm
Gesamttiefe	104 cm
Sitzhöhe vom Boden	50 cm
Gesamthöhe	90 cm

Sitzmaße	39,42, 45, 47, 50 cm x 40 cm
Gewicht	18,6-21 kg
Maximale Kapazität	115 kg bis zur Breite 48 cm 135 kg bei einer Breite von 51 cm
Breite gefaltet	30 cm
Rahmenfarbe	Silber

* abhängig von der Sitzbreite

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.

7. Lager- und Transportbedingungen










Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler,

bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2024 (III)