


1. Eigenschaften

Die Rückenlehne besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Sie besteht aus einem Untergestell mit stufenweiser Rückenlehnenwinkelverstellung, einer Sitzfläche und klappbaren Armlehnen. Die Rückenlehne besteht aus strapazierfähigem und atmungsaktivem Stoff mit einem zusätzlichen Kopfpolster für zusätzlichen Komfort. Der verstellbare Winkel ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten im Liegen oder Sitzen.

Elemente der Rückenlehne:

- a. Rückenlehnenwinkelverstellung
- b. Rückenlehne
- c. Kopfkissen
- d. Armlehnen
- e. Sitz

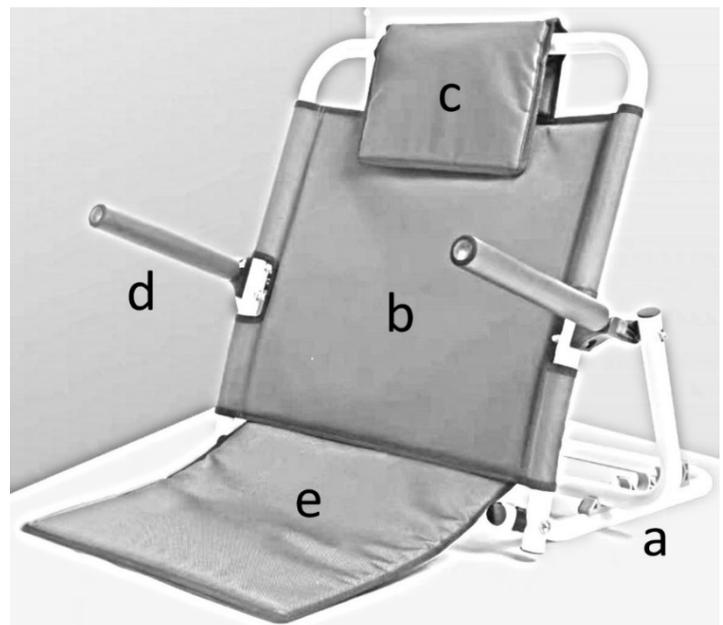

2. Anwendung

Eine Rückenlehne ist ein Hilfsmittel für Patienten mit eingeschränkter Mobilität, die sich dauerhaft in einer liegenden Position befinden und dadurch die selbstständige Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens verhindern oder behindern. Eine Rückenlehne hilft dabei, eine

halb sitzende Position beizubehalten, ohne dass eine andere Person sie festhalten muss. Sie wird auch verwendet, um den Patienten in eine aufrechte Position zu bringen, indem das Herz-Kreislauf-System allmählich an die Sitzposition gewöhnt wird. Die Rückenlehne wird für den Einsatz zu Hause und in Krankenhäusern empfohlen.

3. Einstellung

Der Rückenlehnenwinkel der Armlehne ist stufenweise von 25-57 cm verstellbar. Die Armlehnen verfügen über eine Klapp-/Ausklappfunktion.

4. Technische Daten

Gesamt Breite	55 cm
Innenweite	50 cm
Gesamt Tiefe	50 cm
Neigung Winkel Einstellung	25-57 cm
Gewicht	3,78 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Rahmen Farbe	Weiß

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch der Rückenlehne, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Bewertungen

Führen Sie mindestens alle drei Monate eine Sichtprüfung aller Verbindungselemente (Klemmen, Scharniere) der Rückenlehne durch, einschließlich:

- Zustand des Ratschenmechanismus
- Stabilität und Optik des Rahmens

Reinigung

Kontrollieren Sie regelmäßig den technischen Zustand der Rückenlehne:

- Reinigen Sie den Rahmen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Trocknen Sie ihn gründlich ab.
- **Verwenden Sie** zur Reinigung keine starken Polier- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).

7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung



Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025(I)